

Производитель: «Назалезе Лимитед», Великобритания.

Nasaleze Ltd., Unit 3 Woodside House, Ballafletcher Business Park, Douglas, Isle of Man, IM4 4QE, UK

Держатель РУ: «Замбон С.п.А.», Италия. Zambon S.P.A., Bresso (MI) Via Lillo del Duca, 10-20091, Italy.

Дистрибьютор в России: ООО «Замбон Фарма», 119002, Москва, Глазовский пер., д. 7.
Тел.: + 7 (495) 933-38-30/32, факс: +7 (495) 933-38-31

НАЗАВАЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия средство (фильтр) барьерное отоларингологическое

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Средство (фильтр) барьерное отоларингологическое Назаваль®

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ФСЗ 2008/02844 от 28.03.2018 г.

СОСТАВ:

микронизированная целлюлоза растительного происхождения. Вспомогательные вещества: экстракт натуральной мяты перечной.

ОПИСАНИЕ:

мелкодисперсный порошок белого цвета с легким запахом мяты, по 500 мг во флаконе из полиэтилена с патентованным дозатором и навинчивающимся колпачком. 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещен в пачку картонную.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Назаваль® защищает от развития аллергии, предотвращая контакт слизистой полости носа с аэроаллергенами и поллютантами:

пыльца растений;

бытовые аллергены — клещи домашней пыли, домашняя пыль;

грибковые аллергены;

эпидермальные аллергены животных и птиц;

аллергены тараканов и других насекомых;

химические вещества;

другие микрочастицы, попадающие в носовую полость при вдыхании воздуха.

Назаваль® используется для профилактики и в комплексной терапии аллергического ринита: зуда в носу, отека слизистой носа и нарушения носового дыхания, обильных, жидких, прозрачных выделений из носа, приступов чихания и др. **Назаваль**® действует как естественный барьер по отношению к аэроаллергенам, препятствуя развитию аллергии.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Порошок целлюлозы на слизистой полости носа образует прозрачный, гелеобразный, защитный слой, не мешающий дыханию. Гелеобразный слой является эффективным барьером против аллергенов, защищая организм от аллергической реакции. Спрей

назальный, дозированный **Назаваль**[®] является барьерным средством, не оказывает системного и местного действия.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Применяется при аллергическом рините для защиты слизистой носа от аэроаллергенов и поллютантов, а также других агрессивных факторов внешней среды, вдыхаемых с воздухом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость компонентов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Взрослые и дети: по одному впрыскиванию в каждый носовой ход.

1. Профилактически:

- при аллергии на пыльцу растений (сезонная аллергия) рекомендуется начать использовать **Назаваль**[®] заблаговременно, за 1–2 недели до предполагаемого начала сезона пыления.
- при круглогодичном рините (аллергии на домашнюю пыль, животных и др.) **Назаваль**[®] можно использовать ситуационно за 5–10 минут до предполагаемого контакта с аллергеном.

Профилактическое применение **Назаваль**[®] снижает риск обострения аллергического ринита.

2. С целью предотвращения дальнейшего попадания аллергенов в организм в комплексной терапии при лечении аллергического ринита. Рекомендуемая дозировка: по одному впрыскиванию в каждый носовой ход 3–4 раза в день (через каждые 5–6 часов), как правило, достаточно для защиты от аллергенов в течение всего дня. При необходимости, **Назаваль**[®] может быть использован так часто, как это необходимо. Рекомендуется использовать **Назаваль**[®] перед предполагаемым контактом с аллергенами, например, перед выходом на улицу в период цветения растений, посещением мест массового скопления людей, проведением домашней уборки, контактами с домашними животными.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ:

Назаваль[®] может применяться у женщин во время беременности и в период кормления грудью, поскольку не обладает системным действием и не содержит консервантов.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. При первом использовании сделайте 2 пробных нажатия на стенки флакона в воздух — вы увидите струйку порошка.
2. Перед применением, при необходимости, проведите гигиеническую очистку полости носа.
3. Держите голову прямо, нет необходимости ее запрокидывать.
4. Встряхните флакон.
5. Зажмите пальцем один носовой ход.
6. Поместите носик флакона в противоположный носовой ход и, интенсивно нажав на стенки флакона, сделайте одно

впрыскивание порошка на вдохе.

7. Такую же процедуру проведите с противоположной стороны.

Рекомендуется использовать повторно после каждого очищения носовой полости для возобновления защитного слоя.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Назаваль[®] у детей следует применять под наблюдением взрослых. Безопасность спрея **Назаваль**[®] обусловлена отсутствием взаимодействия с органами и тканями организма. Применение барьерного средства (фильтра) **Назаваль**[®] не влияет на способность к управлению транспортными средствами, не вызывает сонливости. При необходимости совместного применения с другими назальными лекарственными средствами **Назаваль**[®] следует использовать не ранее, чем через 30 минут после их применения. Перед каждым применением **Назаваль**[®] следует очистить носовые ходы. Не рекомендуется использовать **Назаваль**[®] после применения назальных мазей и назальных капель на масляной основе. При попадании средства **Назаваль**[®] в глаза рекомендуется промыть их водой. Следует избегать контакта носика флакона со слизистой носа. Это может привести к закупориванию флакона порошком. Если такое все же случилось, прочистите носик флакона тонким острым предметом (иголкой, зубочисткой).

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Срок годности — 3 года. Не использовать при повреждении флакона.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Хранить в местах, недоступных для детей!

Флакон рекомендуется использовать в течение 3 месяцев после первого вскрытия.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Допускается транспортировка всеми видами транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА:

Отпускается без рецепта врача.